

アルシートDX-B ロールタイプ

80%
エタノール
含浸

エタノールを含浸させた対物清拭用の厚手タイプのシートです。繊維が密にしっかり絡まりあって強度・耐久性に優れ、「使用枚数の軽減によるコスト削減」も期待できます。

突起物のある所を拭いても毛羽が立つ事がなく、シートの取り出し時も「さっと拵がり」作業性UP!



車イス



ポータブルトイレ




歩行器



ベッド周り




オーバーテーブル

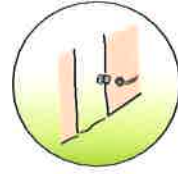

ドアノブ・手すり

車イス(ハンドリムや肘掛、ブレーキ・手押し用グリップ)など手で触れる部分や椅子、杖、器具、耐水性の無い器械類、クリーンルーム内の清拭配膳車、ストレッチャー、保育器、加熱滅菌し難いものに最適

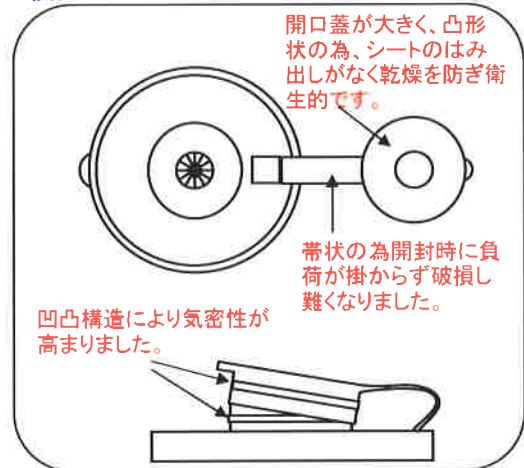

- ①アルシートDX-B(詰替用)は、エタノール薬液含浸シートです。専用容器にセットしてお使いください。
- ②アルシートDX-B(詰替用)の専用容器です。
- ③プロメンテロールDX165(ドライタイプ)はオリジナルの薬液を含浸させて使うのに最適です。

| | | | | |
|--------------|--------------|------------|-----|-----------------------------------|
| 成分(薬液100mL中) | エタノール 精製水 | 83mL 適量 | シート | ウッドパルプ不織布 165mm×180mm 300枚入 |
|--------------|--------------|------------|-----|-----------------------------------|

- 使用上のご注意**
- 本品は高濃度のエタノールを含有するため、火気に近づけたり火気の近くでは使用しないで下さい。
 - 静電気や電磁波の強い場所でのご使用・保管はしないでください。
 - 直射日光の当たる場所や、高温になる場所には放置しないで下さい。
 - 人体の清拭には使用しないで下さい。
 - 小児の手の届かないところに保管して下さい。
 - 素材や塗料の種類によっては変質する恐れがあるので、試し拭きをしてから使用して下さい。
 - 乾燥を防ぐため、使用後は開閉蓋をきちんと閉めてください。
 - トイレには流さないで下さい。
 - 手荒れ防止の為、手袋をはめて使用して下さい。

- 取扱上のご注意**
- アルシートDX-Bを専用容器にセットする時は、袋上部をハサミで切り取り、袋ごと専用容器にセットしてください。
 - 蓋開口穴部にシートをセットする時、シートを指で押し込まず、ワイパーだけを通して下さい。指を開口穴に押し込むと、指が抜けなくなる事がありますのでご注意下さい。

規格

| 商品名 | ウェットタイプ | シートサイズ(mm) | 梱包形態 | 定価(税込) | 1個あたり |
|------------------|---------|------------|------------------|---------|--------|
| ①アルシートDX-B(詰替用) | | 165×180 | 300枚/ロール×4ロール | 15,552円 | 3,888円 |
| ②セット(DX-B+バケツ本体) | | 165×180 | DX-B 4ロール+バケツ 4個 | 24,192円 | 6,048円 |
| 商品名 | ドライタイプ | シートサイズ(mm) | 梱包形態 | 定価(税込) | 1個あたり |
| ③プロメンテロールDX165 | | 165×180 | 300枚/ロール×12ロール | オープン価格 | オープン価格 |

製造発売元



明星産商株式会社

高知県南国市岡豊町八幡4 1 1-1

TEL 088-804-8111

FAX 088-804-8112

お問合せ先